



Masque de protection grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425. Il permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d'une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.

## Caractéristiques

- Conforme aux normes AFNOR (en cours de certification auprès de DGA/IFTH)
- Matière microfibre (tissu non tissé, 70% polyester et 30% polyamide)
- Certifié OEKO TEX 100 Class 1
- Fixation par élastique : 2 tailles disponibles M et L
- Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucun produit chimique)
- Respirant et absorbant
- Matériau stérilisable
- Séchage rapide

## Dimensions

- Masque : 170 x 90 mm
- Élastiques disponibles en 2 tailles M = 190 mm et L = 240 mm

## Emballage

- Emballé en ensembles de 10 unités dans un sachet plastique

## Recommandations

- Laver le masque avant la première utilisation
- Son port est limité à 4h
- Laver le masque pendant 30 minutes à 60°



## Attention

L'utilisation d'un masque est une mesure de protection supplémentaire mais ne remplace pas les autres gestes barrières tels que :

- Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon ou avec une solution désinfectante à base d'alcool.
- Respecter la distanciation sociale recommandée.
- Utiliser un mouchoir à usage unique et tousser ou éternuer dans son coude.

## Comment mettre et retirer le masque

### Mettre le masque

- Avant de mettre le masque, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Repérer le haut du masque. Tenir le masque par les élastiques et l'adapter à chaque oreille. Tenir le masque de l'extérieur et passez les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles, sans les croiser.
- Ajuster le masque près du nez et du menton, sans toucher le devant du masque. Vérifier que le masque couvre bien le menton.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois qu'il est touché, l'utilisateur doit se laver les mains.

### Retirer le masque

- Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.
- Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque.
- Eloigner le masque du visage et des vêtements pour éviter de toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque.
- Placer le masque à laver dans un contenant spécifique.
- Se laver les mains encore une fois.

## Le lavage des mains - Comment ?

LAVER LES MAINS AU SAVON ET A L'EAU LORSQU'ELLES SONT VISIBLEMENT SOUILLEES  
SINON, UTILISER LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'HYGIENE DES MAINS !



Durée de la procédure : 40-60 secondes

